



# EFX-A. Bateria de evaluare a funcționării executive pentru adulți



<b>Scop</b>	evaluarea comprehensivă a funcționării executive în populația generală de adulți din România; evaluare pe trei dimensiuni (memorie de lucru, atenție și raționament), efectuată prin 7 teste de performanță cognitivă.
<b>Grup țintă</b>	Etalonat pe adulți (20-69 ani) cu studii superioare sau liceale;
<b>Utilizatori</b>	Specialiști licențiați în: psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie, neuropsihologie, psihiatrie.
<b>Domenii de aplicare</b>	Psihologie clinică și psihoterapie, Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională;
<b>Timp mediu de aplicare</b>	variabil, 8-18 minute per test; o evaluare poate include 1-7 teste (la alegerea psihologului); o evaluare completă poate dura 1.5h (incluzând scurte pauze între teste);
<b>Mod de aplicare</b>	computerizat, prin intermediul unei aplicații desktop dedicate.

## Descriere

Bateria EFX-A este o colecție de **7 teste de performanță cognitivă** pentru adulți care evaluează **trei dimensiuni** ale funcționării executive:

- memorie de lucru (4 teste: TML-V, TML-S, TML-C, TML-A);
- atenție (2 teste: TA-X, TA-COM);
- raționament (1 test: TR-V).

Testele Bateriei EFX-A au fost validate și etalonate pentru populația din România (adulți 20-69 ani cu studii superioare sau liceale) și prezintă caracteristici psihometrice adecvate în termeni de validitate și fidelitate, probate în patru studii cu eșantioane diverse. Testele din Bateria EFX-A au fost acreditate la Colegiul Psihologilor din România pe o perioadă nedeterminată, pe domeniile:

- Psihologie clinică și psihoterapie;



- Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor;
- Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională;
- Psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Testele rulează printr-o aplicație desktop dedicată (aplicația Efx), dezvoltată de Cognitrom. Rezultatele sunt cotate și interpretate automat și pot fi vizualizate în cadrul unor rapoarte de evaluare curentă sau/și longitudinală.

- [Teste disponibile prin aplicația Efx \(Bateria EFX-A și scalele BDEFS\)](#);
- [Avantajele Bateriei EFX-A și aplicației Efx](#);

Rezultatele obținute prin evaluarea cu teste precum cele din Bateria EFX-A pot informa asupra demersurilor din domeniile: consiliere și orientare în carieră, evaluare și intervenție psihoterapeutică sau pentru optimizarea sănătății mintale, selecție de personal, intervenție și recuperare neuropsihologică sau monitorizarea funcționării executive în contextul unor evenimente neuropsihologice. Puteți consulta aici un: [raport demonstrativ generat din aplicația Efx](#) (Notă acest raport a fost generat pentru [pachetul extins de teste](#) care include și scalele BDEFS. Raportul demo include o evaluare longitudinală cu testele EFX-A și cu două scale BDEFS). Cerințe hardware și software minimale necesare pentru instalarea și rularea aplicației Efx:

- Laptop/computer: ecran/monitor cu rezoluție minimă 1024 x 768; dimensiune ecran recomandată 15.6" - dimensiune minimă 14" (nu este compatibil cu tableta, iar telefonul mobil este inadecvat pentru testarea cu aceste instrumente);
- Tastatură fizică și mouse (nu touchpad sau tastatură virtuală);
- Sistem de operare: Windows (versiunea 10 sau 11), MacOS (minim versiunea 11.6.0, cu procesor Apple) sau Linux;
- Rulare în aplicația dedicată - Efx, mod full-screen, fără alte programe care rulează în background;
- Conexiune stabilă la internet.

*Important: Testele din Bateria EFX-A pot fi administrate doar local, pe dispozitivul psihologului licențiat, prin intermediul aplicației Efx. Este recomandat ca psihologul să monitorizeze administrarea testelor, dar aplicația are și o funcție de rulare protejată cu parolă în caz că subiectul evaluat este lăsat nesupravegheat.*



Efx

## RAPORT DE TESTARE LONGITUDINALĂ

Ion Popescu (Demo)

Data nașterii: 01.01.1981  
 Vârsta la momentul evaluării: 44 ani  
 Sex: Masculin  
 Nivel de educație: superior  
 Adresă: (subiect demo)  
 Email: office@cognitrom.ro  
 Telefon: 0749122603

Instrumente utilizate: Bateria de evaluare a funcționării executive pentru adulți S, TML-C, TML-A, TA-X, TA-COM, TR-V; alte instrumente: BDEFS-LF, BDEFS-SF

Prezentul raport a fost realizat pe baza răspunsurilor la instrumentele alese. Răspunsurile sunt raportate la normele valide pe populația din România și reflectă realitatea în limita unui proces corect de completare a probelor, prin răspunsuri oneste la întrebări. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, raportul reflectă starea la momentul evaluării. Acest raport de evaluare nu înlocuiește un consult clinic și poate fi folosit ca probă în instanță, ci poate fi utilizat de către persoana evaluată de autocunoaștere.

Raport generat automat printr-o aplicație Cognitrom  
 doamnei/șomnului Paș. Demo Cognitrom

### REZULTATE DETALIATE teste efectuate

#### Test de memorie de lucru verbală - TML-V [autoevaluare] [aplicarea 1] [completat în 02.09.2025, 20:05]

> Descriere | Acest test evaluează eficiența memoriei de lucru verbale într-o măsură moderată.

Nivel de performanță: **Mediu**  
 Scor parțial: **27**  
 Procent de corectitudine (sensitivitate): **82.3%**

foarte scăzut   scăzut   mediu   ridicat   foarte ridicat

TML-V  
Scor brut: **33.4**

> Interpretare: Rezultatul obținut indică un nivel mediu al capacității memoriei de lucru verbale, respectiv o performanță caracteristică mediei populației. Acest lucru înseamnă că persoana evaluată are o abilitate medie de a menține în memorie informații verbale pe termen scurt, în ciuda unor sarcini mai solicitante pe care le realizează.

#### Test de memorie de lucru verbală - TML-V [autoevaluare] [aplicarea 2] [completat în 03.10.2025, 19:30]

> Descriere | Acest test evaluează eficiența memoriei de lucru verbale într-o măsură moderată.

Nivel de performanță: **Mediu**  
 Scor parțial: **25**  
 Procent de corectitudine (sensitivitate): **82.3%**

foarte scăzut   scăzut   mediu   ridicat   foarte ridicat

TML-V  
Scor brut: **21.887**

> Interpretare: Rezultatul obținut indică un nivel mediu al capacității memoriei de lucru verbale, respectiv o performanță caracteristică mediei populației. Acest lucru înseamnă că persoana evaluată are o abilitate medie de a menține în memorie informații verbale pe termen scurt, în ciuda unor sarcini mai solicitante pe care le realizează.

#### Test de memorie de lucru vizuo-spațială - TML-S [autoevaluare] [aplicarea 1] [completat în 02.09.2025, 19:39]

> Descriere | Acest test evaluează capacitatea memoriei de lucru vizuo-spațiale complexe.

Nivel de performanță: **Mediu**  
 Scor parțial (memorare pstrată): **18**  
 Procent de corectitudine (sensitivitate): **82.3%**

foarte scăzut   scăzut   mediu   ridicat   foarte ridicat


TML-S  
Scor brut: **18**

> Interpretare: Rezultatul obținut indică un nivel mediu al capacității memoriei de lucru vizuo-spațiale, respectiv o performanță caracteristică mediei populației. Acest lucru înseamnă că persoana evaluată poate reține mai multe informații vizuale chiar dacă realizează simultan și alte sarcini.

Copyright © Cognitrom

### REZULTATE [cotare și interpretare]

#### SUMAR rezultate teste EFX-A efectuate

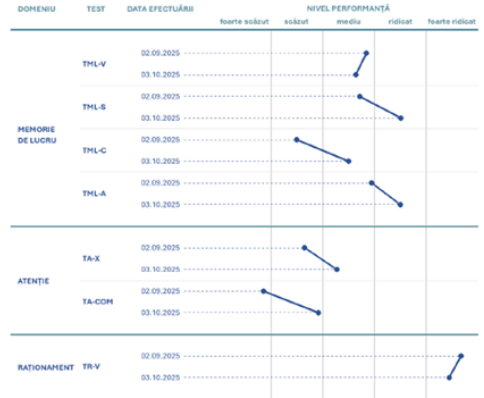



COGNITROM



div.summary.entry-summary > h1 { font-family: sans-serif; }

## Beneficii

- Realizarea unor evaluări multidimensionale ale funcționării executive cu teste științifice noi, validate și etalonate pe populația din România și acreditate COPS;
- Rularea testelor printr-o aplicație dedicată (**aplicația Efx**) care permite:
  - Rularea evaluărilor în condiții controlate, printr-o procedură care asigură validitatea rezultatelor;
  - Cotare și interpretare automată a rezultatelor, cu grafice și descriptori de performanță;
  - Vizualizarea rezultatelor sub forma unor rapoarte de evaluare individuală sau longitudinală (pentru evaluări multiple);
  - Gestionarea unui registru de clienți securizat, salvat encriptat pe dispozitivul propriu;

## Conținut Pachet

- Acces la aplicația Efx, prin intermediul căreia:



- se gestionează registrul de clienți, se administrează testele și se eliberează rapoartele cu rezultate;
- Manualul bateriei, disponibil în format digital în interiorul aplicației Efx;
- 25 de evaluări în aplicația Efx
  - o evaluare poate conține oricâte din cele 7 teste EFX-A (la alegerea psihologului);
  - evaluările pot fi administrate la clienți diferiți sau la aceiași clienți în mod repetat (evaluare longitudinală);
  - în aplicație, o evaluare se consideră *consumată* în momentul în care se rulează primul test inclus în aceasta - modificările ulterioare aplicate pe aceeași evaluare (ex. adăugare/ eliminare teste sau generare raport nu modifică consumul);
- Cursul de certificare pentru un psiholog în vederea utilizării Bateriei EFX-A și a aplicației Efx;

## Tarife

---

### Persoane fizice/cabinete individuale:

- Pachet de bază: 3200 lei (TVA inclus), cu posibilitate de achitare în 2 tranșe egale.
- Evaluări suplimentare:
  - 10 evaluări: 900 lei (TVA inclus)
  - 25 evaluări: 1800 lei (TVA inclus)

### Persoane juridice/instituții:

- Pachet de bază: 4500 lei (TVA inclus)
- Evaluări suplimentare:
  - 10 evaluări: 1400 lei (TVA inclus)
  - 25 evaluări: 2500 lei (TVA inclus)

---

Notă: Aceste tarife se referă la produsul individual EFX-A. Aveți și posibilitatea de a achiziționa avantajos un pachet combo care include Bateria EFX-A și scalele BDEFS, ambele instrumente acreditate COPSI și disponibile în format digital prin aplicația Efx. Pentru informații despre pachetul combo, accesați: [Pachet combo: EFX-A și BDEFS](#)

## Certificare

---

Licența de utilizare a Bateriei EFX-A în aplicația Efx se acordă persoanei fizice desemnate pentru licențiere pe o perioadă nedeterminată.



În vederea obținerii licenței de utilizare este necesar ca persoana fizică desemnată să posede diplomă de licență în unul din domeniile: psihologie, neuropsihologie, psihiatrie.

Persoana desemnată licențierii are următoarele obligații:

- să participe la cursul de instruire pentru Bateria EFX-A.
- să promoveze examenul de evaluare a cunoștințelor dobândite la cursul organizat de furnizor pentru utilizarea Bateriei EFX-A.

### *Situații speciale:*

În condițiile în care se dorește schimbarea persoanei licențiate inițial în utilizarea Bateriei EFX-A, Beneficiarul trebuie să anunțe Furnizorul, să solicite și să achite un nou curs de certificare pentru persoana nou desemnată.

Cost curs de certificare pentru o persoană nou desemnată, care înlocuiește persoana anterior licențiată:

- Persoane fizice – 650 lei (TVA inclus)
- Persoane juridice – 900 lei (TVA inclus)

## **Procedura De Achiziție**

### **I. PLATĂ INTEGRALĂ**

Obținerea EFX-A și a licenței de utilizare se face după următoarea procedură:

1. Se adaugă produsul dorit în coșul de cumpărături, conform categoriei de preț de care aparține clientul (persoană fizică sau persoană juridică).
2. După adăugarea produsului în coș, se accesează butonul „Comanda mea” și se apasă butonul „Finalizare comandă”. În cadrul acestei etape, se va solicita completarea unui formular de comandă.  
ATENȚIE: Informațiile introduse de client în formularul de comandă vor fi introduse în contractul de achiziție și în factura fiscală.
3. După ce, prin intermediul comenzii de pe site-ul COGNITROM, primim formularul completat de către client, reprezentantul firmei Cognitrom îi va trimite acestuia, prin mail, o factură proformă și un contract personalizat.
4. Clientul semnează contractul și îl trimite prin e-mail, împreună cu copia aferentă a dovezii de plată, conform condițiilor de plată din contract (copie a ordinului de plată sau a chitanței de achitare a sumei).
5. După primirea contractului semnat și a dovezii de plată, clientul va fi programat la



unul dintre cursurile de instruire EFX-A și notificat în acest sens.

6. După participarea la cursul de instruire și susținerea examenului de licențiere, care au loc ONLINE, beneficiarul primește bateria EFX-A și certificatul de licență.

## II. PLATĂ ÎN RATE (exclusiv persoane fizice și cabinete individuale de psihologie)

Obținerea Bateriei EFX-A și a licenței de utilizare se face după următoarea procedură:


1. Se adaugă produsul dorit în coșul de cumpărături.
2. După adăugarea produsului în coș se accesează butonul „Comanda mea” și se apasă butonul „Finalizare comandă”. În cadrul acestei etape, se va solicita completarea unui formular de comandă. În formularul de comandă la rubrica OBSERVAȚII treceți mențiunea PLATĂ ÎN RATE.  
ATENȚIE: Informațiile introduse în formularul de comandă vor fi introduse în contractul de achiziție și în factura fiscală.
3. După ce, prin intermediul comenzii de pe site-ul COGNITROM, primim formularul completat de către client, reprezentantul firmei Cognitrom îi va trimite acestuia, prin mail, o factură proformă și un contract personalizat pe sistemul de rate.
4. Clientul semnează contractul și îl trimite prin e-mail, împreună cu copia aferentă a dovezii de plată, conform condițiilor de plată din contract (copie a ordinului de plată sau a chitanței de achitare a sumei).
5. După primirea contractului semnat și a dovezii de plată pentru prima tranșă, clientul va fi programat la unul dintre cursurile de instruire EFX-A și notificat în acest sens. Beneficiarul se obligă să participe la cursul de instruire în termen de 3 luni de la achitarea primei tranșe.
6. După participarea la cursul de instruire și promovarea examenului de licențiere, care au loc ONLINE, beneficiarul primește Bateria EFX-A și certificatul de licență.

Ce presupune plata în rate:


- Costul pachetului de bază EFX-A se va achita în 2 tranșe egale, cu prima tranșă urmând a fi achitată de către client la momentul semnării contractului.
- Cea de-a doua tranșă se va achita în termen de maxim 6 luni de la încheierea contractului, pe baza facturii rest de plată emisă de furnizor după achitarea primei tranșe. Orice întârziere a plății se penalizează cu 0,1% pe zi întârziere.




## Produse similare

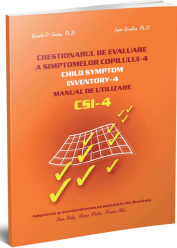


Chestionar de evaluare a copiilor de vârstă școlară (CSI-4)

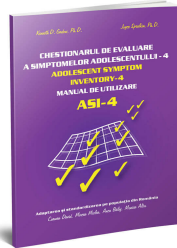

Chestionar de evaluare a simptomelor adolescențului (ASI-4)

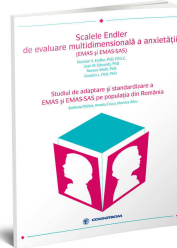

Scalele Endler de evaluare multidimensională a anxietății (EMAS și EMAS-SAS)

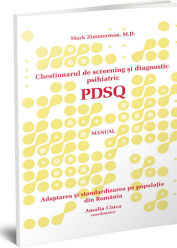

Chestionarul de screening și diagnostic psihiatric (PDSQ)



Platformă de evaluare a dezvoltării 3-6/7 ani (PEDa)